


Hinweis zur Entnahme des Implantats + Lösen des Transferteils (blau)
Note to removal of implant + loosening of transfer part (blue)

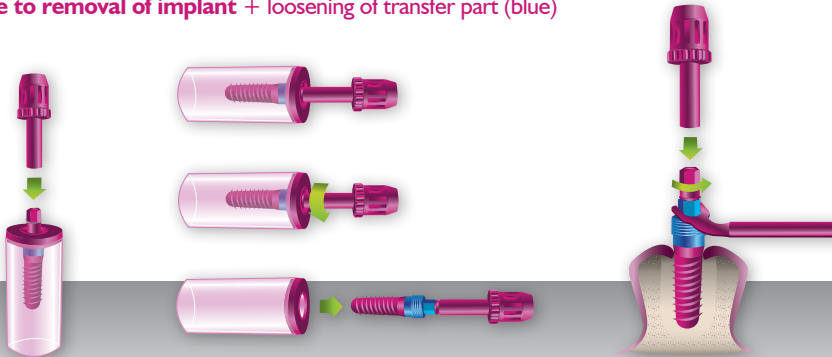

Hinweis zur Entnahme des Implantats + Lösen des Transferteils (blau):

Die Adapter wird auf das Transferteil (blau) aufgesetzt. Durch Linksdrehung kann das Implantat aus der Sterilampulle entnommen werden. Nach der Insertion wird das Implantat am blauen Sechskant mit dem Halteschlüssel gegen Verdrehen gesichert und das Transferteil mit einer Linksdrehung des Adapters vom Implantat gelöst.

Note to removal of implant + loosening of transfer part (blue):

The adapter for insertion is put on the transfer part (blue). With an anti-clockwise turn the implant is being removed of the sterile ampoule. After insertion the implant is secured at the blue hexagon with the holding key to prevent movement, a counter-clockwise action of the adapter removes the transfer part.

